

風の郷

座位保持装置完成用部品

スリーディービーエス

3DBS

特許出願中
三次元バックサポートシステム

トータルコンタクトの強固な支持性と通気性を兼ね備え
バックサポートを劇的に変換します



(※カバーをはずした状態)


- ★ 肩甲部から体幹部、腰部、骨盤部まで深いホールドで包み込むトータルコンタクトの安心感
- ★ 身体の成長や変形の進行に応じて高さ・幅・角度・奥行の調節が簡単にできます
- ★ 側弯、後弯、前弯などの高度の変形にも対応します
- ★ 既存の椅子や車椅子などハンガー部分のある様々なフレームに取り付けることができます
(※ハンガー部分のないフレームでもオプション部品を使うことで取付けができるようになります)
- ★ 一体として脱着収納ができるためフレームの折りたたみ機能を活かすことができます

サイズ寸法表

サイズ	背高さ	腋下高さ	骨盤幅目安	取付フレーム背幅	最小寸法	重量	耐荷重
M	40~48cm	29~38cm	18~34cm	34~44cm	H42×W33×D19cm	3.5kg	50kg
L	46~56cm	34~45cm	20~36cm	38~46cm	H48×W38×D22cm	4.0kg	50kg
LL	52~62cm	42~51cm	24~41cm	40~50cm	H54×W40×D26cm	4.5kg	50kg

(※ フレームへの取付高さやフレーム幅によって多少の誤差があります)

標準の製品構成

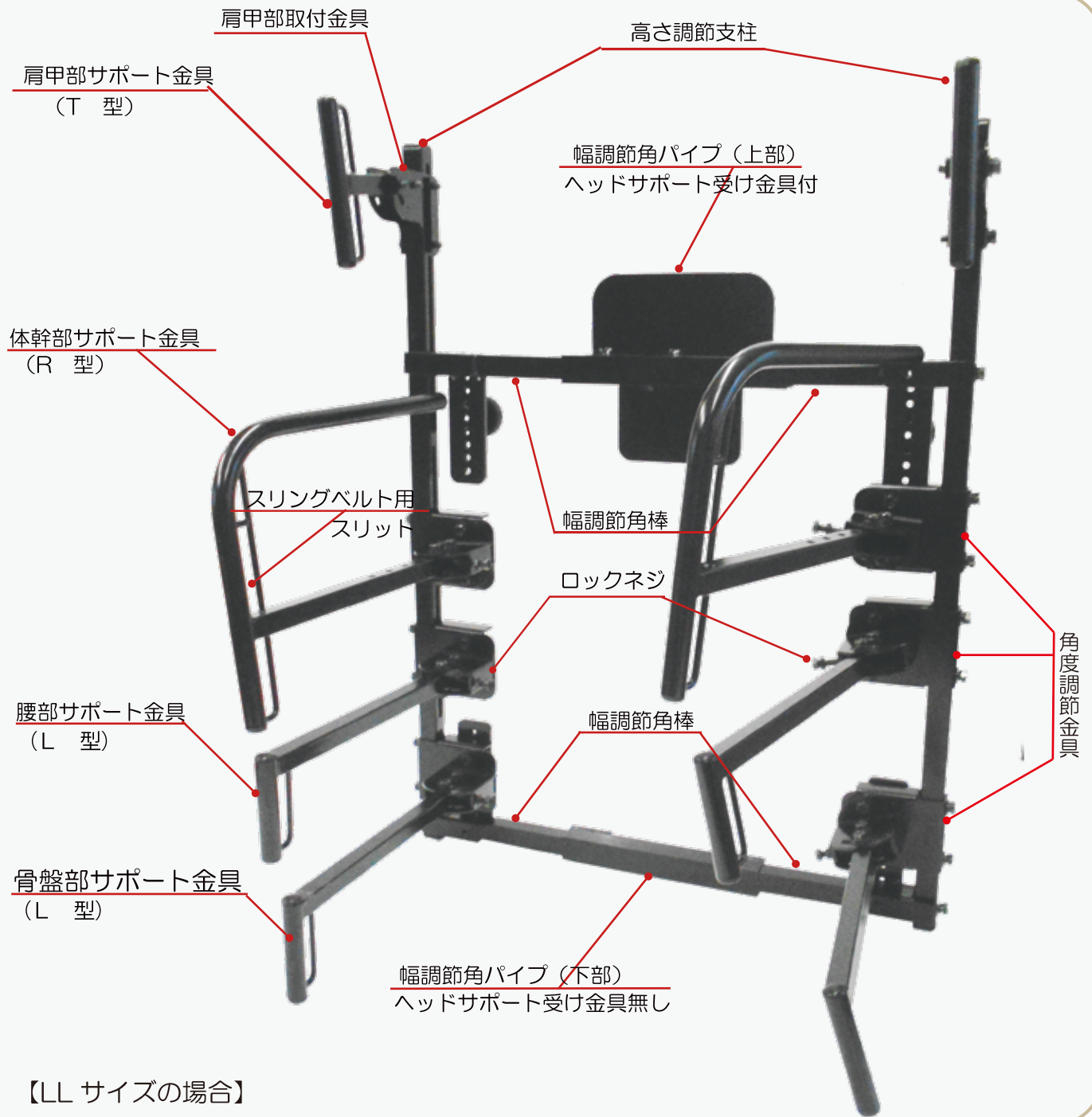

(Mサイズ、Lサイズの場合は腰部サポート金具は付属しません)




※ その他成長や身体の変形に対応して豊富なオプションパーツをご用意しております


オプションパーツで高度の変形にも対応します

後弯がある場合

肩甲骨部サポート金具 T 型 S (または SL) サイズに長さ調節のできる **入れ子パイプ 88** を取り付けてサポート深さを延長します


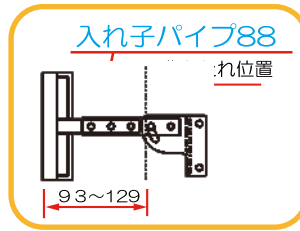


T型Sサイズ+入れ子パイプ88
(T型SLサイズ)

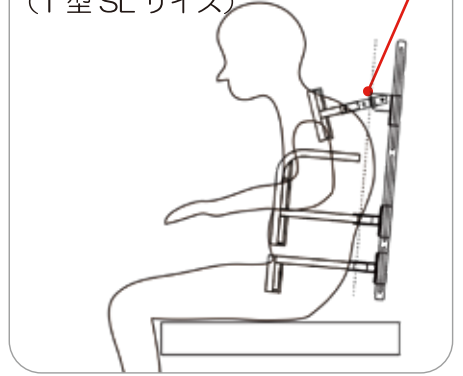

前弯がある場合



M または L サイズで高度な前弯がある場合は体幹部 **R 型** に LL サイズの場合は腰部 **L 型** に **角度固定スライド金具+角度調節式延長パイプ** を取り付けてサポート深さを延長します

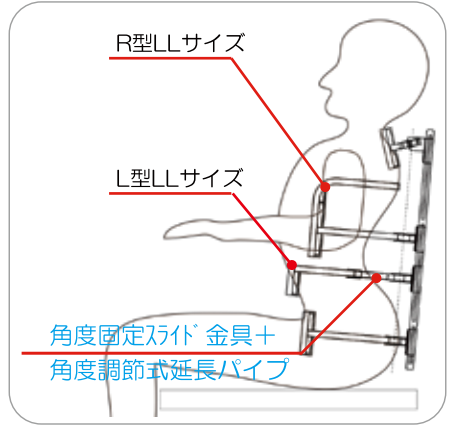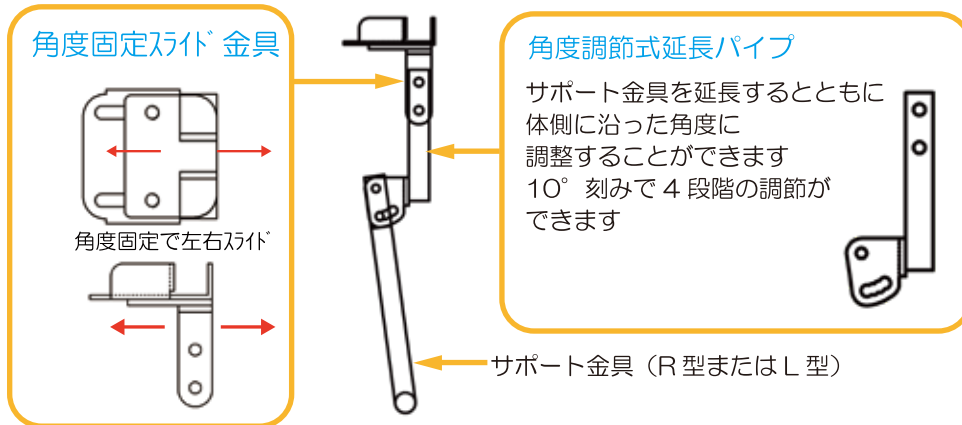

(※LLサイズセットの場合)

側弯がある場合

側弯の凹側と凸側で取付金具を使い分けます

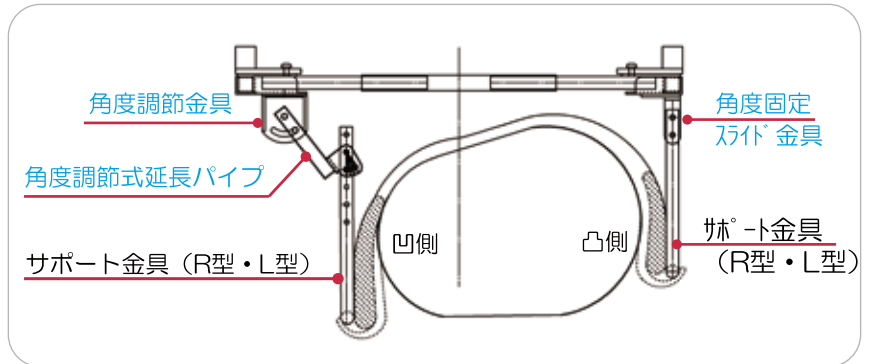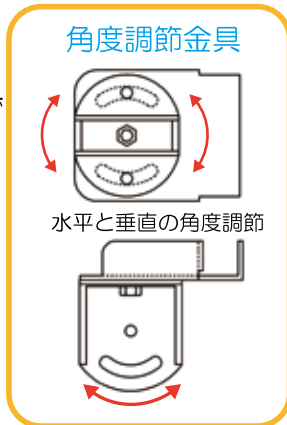

<凹側の場合>


体幹部**R型**と腰部**L型** (LLサイズの場合) に **角度調節金具+角度調節式延長パイプ** を使って凹側の崩れを防ぎます

骨盤部も**角度調節金具**を使います

<凸側の場合>

体幹部**R型**と腰部**L型** (LLサイズの場合) に **角度固定スライド金具** を使って凸側の崩れを防ぎます

骨盤部は**角度調節金具**を使います

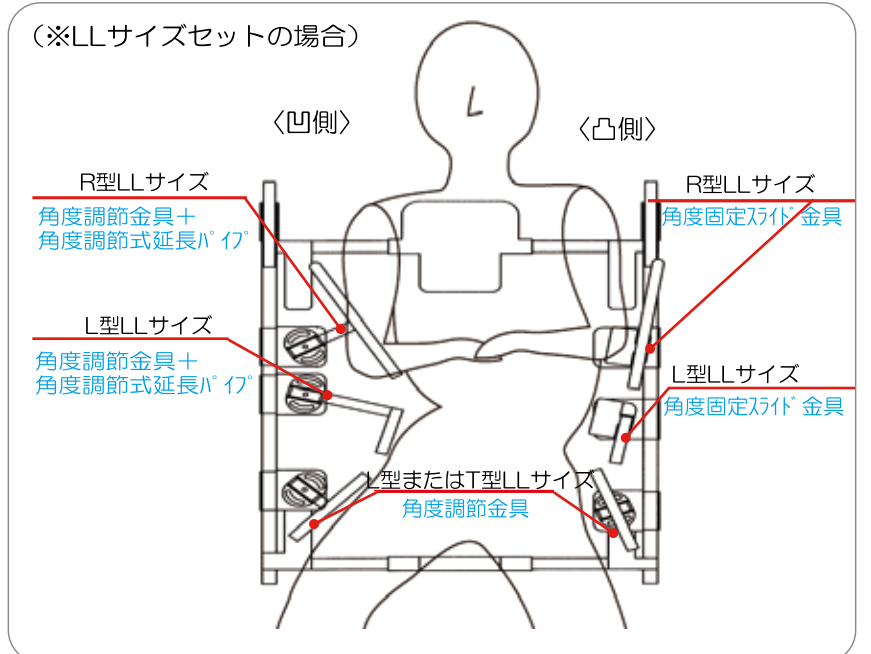


フレームへの取り付け方

今お使いのフレームに合わせて幅が調節できます

【ハンガー部分がある場合】

モールドタイプのフレーム

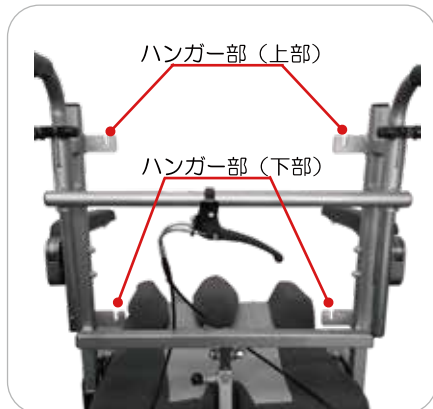


ハンガー部分を使って取り付ける

高さ調節パイプが付属している場合



高さ調節パイプの穴を使って取り付ける

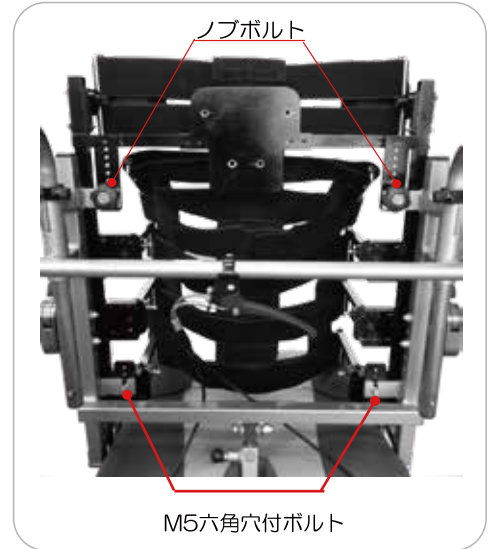

【ハンガー部分が無い場合】

背フレームが丸パイプの場合

丸パイプ取付用クランプセットを背パイプの4ヶ所に取り付ける
(※ Φ22の丸パイプに適合)




背フレームが角パイプの場合

貫通穴を開けて角パイプ取付用プレートで直接ボルトで固定する



普通型車椅子、簡易型電動車椅子、標準型電動車椅子など

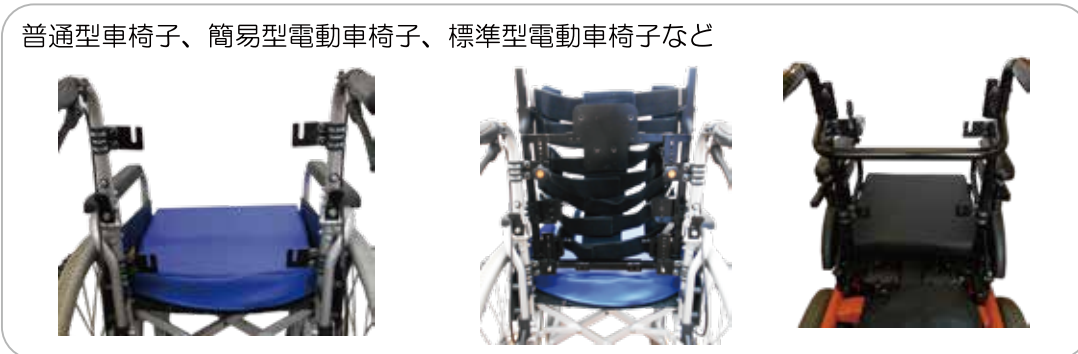

カラーサンプル



風の郷工房(有)

URL <http://www.kzenosato.co.jp>

本 社

TEL 0238-52-1446

山形県東置賜郡高島町大字一本柳2535-1

仙台営業所

TEL 022-344-8471

宮城県仙台市泉区朴沢字細田4-1